

CORSET LOMBO-SACRÉ EXOS

Recommandations spécifiques

Le corset lombo-sacré EXOS est un appareillage qui permet de diminuer la compression entre les vertèbres de la colonne vertébrale, au niveau des lombaires, afin réduire la douleur et favoriser la guérison.

Installation

1) Tirer vers le haut les deux boutons BOA pour libérer la tension des câbles. Cela permet aux panneaux de se séparer.

2) Installer la ceinture sur votre hanche en vous assurant de couvrir le dessus des fesses et de centrer les câbles à l'arrière, vis-à-vis la colonne. Fermer la ceinture à l'aide de la fermeture avec velcro, le plus serrer possible.

3) Pousser sur les deux boutons BOA, situés de chaque côté de votre bassin pour enclencher le mécanisme. Tourner les deux boutons dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer la ceinture.

4) Lorsque vous êtes assis, vous pouvez tirer sur les boutons BOA afin de laisser plus de place aux hanches et à l'abdomen. N'oubliez pas de repeser sur les boutons pour fixer le système et de serrer davantage lorsque vous vous remettez debout.


*** Ne jamais porter le corset directement sur la peau. Il est recommandé de porter un chandail serré en dessous.

Entretien

Si vous voulez, vous pouvez nettoyer le corset à la main et à l'eau froide. Utiliser un savon doux mélangé à de l'eau. Bien rincer le corset à l'eau froide pour éviter l'accumulation de résidu de savon qui pourrait créer de l'irritation ou endommager l'appareillage. Laisser sécher le corset à l'air libre.



Bouton BOA

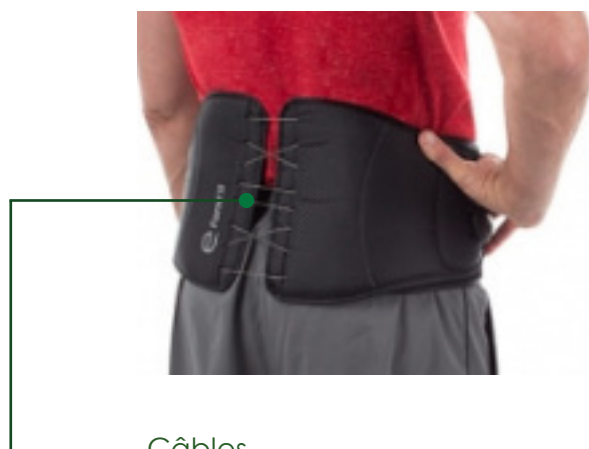

Câbles

Sherbrooke, Est
360, rue Galt Est, bur. 320,
Sherbrooke (Québec) J1G 1X9
T: 819 340-1234
info@laboratoireevo.com

Granby
459, rue Principale,
Granby (Québec) J2G 2W9
T: 450 777-3221
info@laboratoireevo.com

Evo Orthopédie Technique
1851, rue Sherbrooke E, bur.401,
Montréal (Québec) H2K 4L5
T: 438 386-6966
montreal@laboratoireevo.com

Sherbrooke, Ouest
21, boulevard J.-A.-Bombardier
Sherbrooke (Québec) J1L 0H8
T: 819 340-1234
info@laboratoireevo.com

Lac-Mégantic
6250, rue Salaberry,
Lac Mégantic (Québec) G6B 1H8
T: 819 340-1234
info@laboratoireevo.com